



אלמוג-פרו מכונת קריאה רב לשונית

תאור מקשים

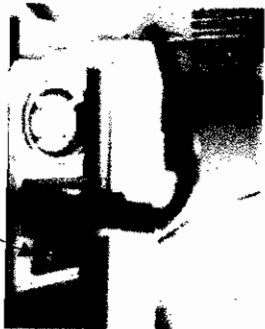

מפסק
הפעלה ראשי

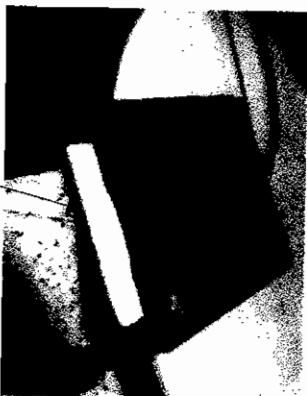

כונן
דיסקטים



משטה
סריקה



הפעלה
והיבוי



עוצמת
קול




מהירות
דיבור




סריקה

הפסקה
זמנית
ואנטר

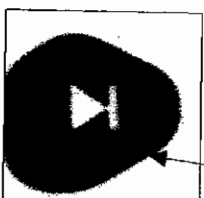

חץ
מעלה

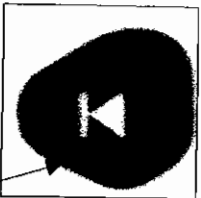

חץ
מטה



עצור

תקציר פקודות בסיסיות

- הפעלה – הפעל כפתור הפעלה ראשי. לחץ על כפתור ההפעלה והכיבוי הממוקם בפינה השמאלית התחתונה בקדמת המכשיר.
- כיבוי – לחץ על הכפתור ההפעלה והכיבוי בקדמת המכשיר לחיצה ארוכה עד להישמע אות הכיבוי.
- סריקה – פתח את דלת הסורק, הבח דף או ספר על גבי הזכוכית, סגור את דלת הסורק ולחץ על הכפתור שצורתו חץ ימינה.
- הפסקה זמנית – בזמן קריאה לחץ על הכפתור שצורתו עגולה, להמשך קריאה לחץ על אותו כפתור שוב.
- עוצמת קול – השתמש בכפתור המסתובב העליון הממוקם באמצע קדמת המכשיר, שמאלה להנמכה, ימינה להגבהת עוצמת הקול.
- מהירות הדיבור – השתמש בכפתור המסתובב מתחת לכפתור עוצמת הקול, שמאלה להאטה, ימינה להאצת מהירות הדיבור.
- סוף מסמך – חץ מטה + חץ מעלה.
- תחילת מסמך – חץ מעלה + חץ מטה.
- עצירת קריאה – לחיצה על הכפתור הרבוע הממוקם בצד ימין בקדמת המכשיר.
- כניסה לתפריט – לחיצה על הכפתור עצור הכפתור הרבוע הממוקם בצד ימין בקדמת המכשיר.
- כפתור סריקה - סרוק מסמך חדש והקרא אותו.
- כפתור הפסקה – הפסק / המשך לקרוא או בחירת פריט מהתפריט או פתח מסמך נבחר מתוך רשימת מסמכים.
- כפתור עצור - עצור את הקריאה.
- חץ מעלה + כפתור הפסקה - קרא או איית מילה.
- חץ מטה + כפתור הפסקה - בחר את אופן הניווט בטקסט.
- חץ מעלה – חזרה לעבר תחילת הטקסט בהתאם להגדרת הניווט.
- חץ מטה – מתקדם לעבר סוף הטקסט בהתאם להגדרת הניווט.
- חץ מעלה + חץ מטה – תחילת הטקסט או תחילת רשימת מסמכים.
- חץ מטה + חץ מעלה - סוף הטקסט או סוף רשימת מסמכים.
- חץ מעלה + כפתור עצור - השמע מצב נוכחי.
- כפתור עצור כאשר הקריאה הופסקה - כניסה לתפריט.
- כפתור הפסקה + חץ מעלה או מטה – עבור 10 מסמכים מעלה או מטה ברשימת המסמכים.
- כפתור סריקה + כפתור הפסקה - מחק מסמך מתוך רשימת מסמכים.
- כפתור סריקה + חץ מעלה או מטה – בחר פרמטר בתפריט סורק.
- כפתור סריקה - נבחר או לא נבחר בתפריט הגדרות כלליות.
- כפתור הפסקה + כפתור מהירות דיבור - בדיקה וכיוון של מהירות הדיבור על משפט לדוגמא.